

**Endlich richtig
pflegen.**



Cleanius
Das Steckbecken

Weil wir uns alle wünschen, nie in diese Situation zu kommen.




- ~~☒~~ hart, kalt und schmerzhaft
- ~~☒~~ Patienten- und Bettenverschmutzung
- ~~☒~~ Druckgeschwüre und Infektionsgefahr
- ~~☒~~ Auslaufgefahr - kein Spritzschutz



Die saubere Lösung, Cleanius

Das Steckbecken

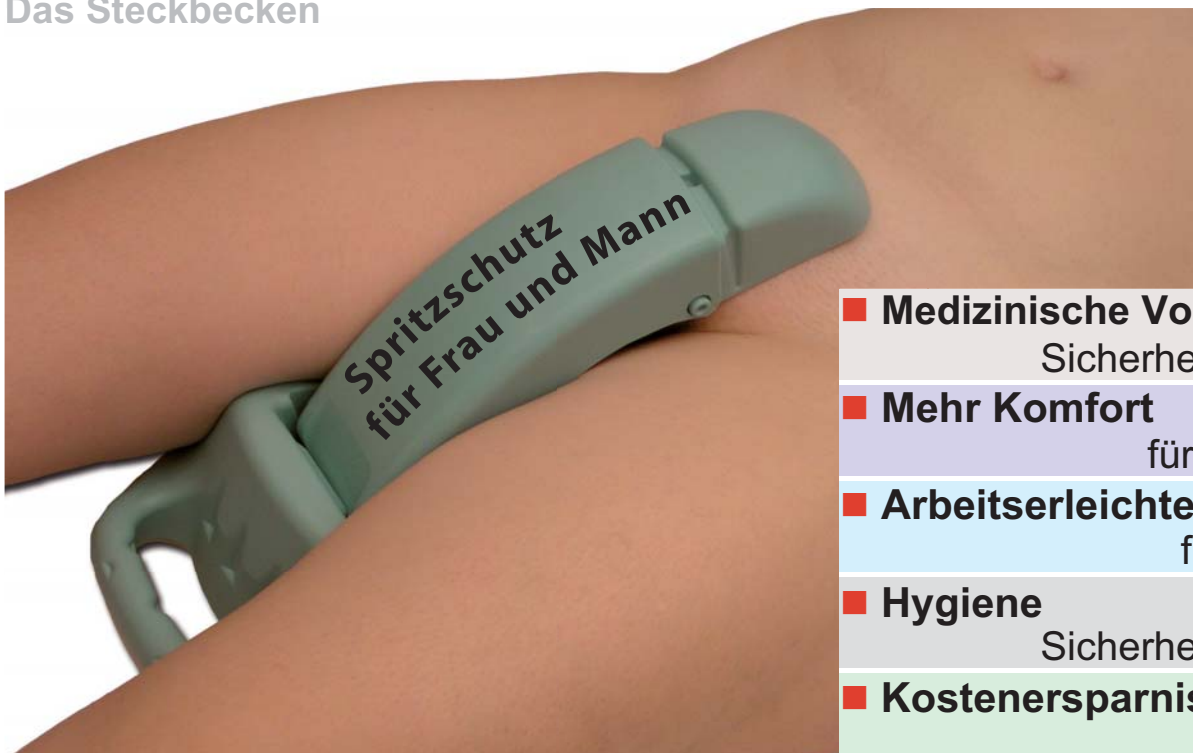

- **Medizinische Vorteile**
Sicherheit in der Pflege
- **Mehr Komfort**
für Ihre Patienten
- **Arbeitserleichterung**
für Ihr Personal
- **Hygiene**
Sicherheit in der Pflege
- **Kostensparnis**
für Ihr Haus

Der IF Product Design Award wurde in insgesamt 16 Kategorien vergeben:

Cleanius hat in der 13. Kategorie, Medizin und Healthcare die Jury in allen Bewertungskriterien überzeugt.

- Gestaltungsqualität
- Verarbeitung
- Materialauswahl
- Innovationsgrad
- Umweltverträglichkeit
- Funktionalität
- Ergonomie
- Gebrauchsvisualisierung
- Sicherheit
- Markenwert / Branding
- Universal Design



iF yearbook product 2009 - Hans Strohmeier

Produkte dieser Kategorie sind im Entstehungsprozess geprägt durch eine intensive Auseinandersetzung der Ingenieure, Designer und Mediziner im Hinblick auf den Patienten. Neueste Erkenntnisse der Medizin, der Technologie und Wissenschaft und neue Materialien werden bei der Entwicklung der Produkte für die gesundheitliche Vorsorge, für die Laborarbeit, für die Intensivmedizin und für die Rehapphasen der Menschen, in den Entstehungsprozessen berücksichtigt. ...



product design award

2009

Cleanius

Steckbecken Bettpfanne bedpan


Design
ServoClean
Helmut Utz, Hans Holzammer,
Michael Walk
GERMANY


Manufacturer
HOLZAMMER Kunststofftechnik GmbH
GERMANY



 Ralph Wiegmann Fritz Freerkler

102_24839



Medicine/Health + Care 

Product
Cleanius
Steckbecken Bettpfanne
Bedpan

Design
ServoClean
Emmerkingen, Germany

Manufacturer
HOLZAMMER Kunststofftechnik GmbH
Sengenthal, Germany

Steckbecken Cleanius ersetzt den 100 Jahre alten Blechnachttopf. Die Bettpfanne verfügt über folgende Eigenschaften: warmer Kunststoff, geschlechterunabhängig; Urin und Stuhl gleichzeitig; Wirbelsäulenaussparung; Dekubitusprophylaxe, große Auflageflächen mit hoher Druckentlastung, hoher Liegekomfort durch flachen Rand, Genitalabdeckung mit Spritzschutz, Sichtschutz, Geruchschutz, keine Bettverschmutzung, auslaufsicher, Kanalisierung der Ausscheidungen, Kreisdrichtung mit Doppelkammer ist auslaufsicher, keine Vakuumadhäsion, geringere Geruchsverschmutzung; der Patient liegt über, nicht in seinen Ausscheidungen; keine Sekundärinfektionen; Pflegeeasierheit, Kostenersparnis. Ein Attraktivitätsgewinn für Institutionen.

Bedpan Cleanius replaces uncomfortable 100-year-old steel bedpan. Features: warm plastic, unisex, urine and stool simultaneously, vertebral column relieving immersion, Decubitus prophylaxis, big surface allows reduction of point load, high lying comfort, flat edges, genital cover protection, reduction of odors, no soiled beds, leak proof genital cover with splash protection, funnel of excrements into Cleanius, all around sealing-double chamber system, no vacuum suction, reduced soiling of buttocks because patient is lying above, not in his excrements; no super infections, safety in care. Institutions gain reputation and reduce cost.

313

Medicine/Health + Care Hans Strohmeier

Auszug Kategorie Kolumne 13: Medicine/ Health + Care

Ganz einfache Produkte, die bei der Pflege und Hygiene am Patienten zur Anwendung kommen, verlangen von den Entwicklern ebenfalls die intensive Auseinandersetzung mit dem Gebrauch und sei es nur ein Essteller oder eine Bettpfanne die eine überzeugende Lösung zeigen und zudem für das Pflegepersonal eine Erleichterung deren täglichen Aufgaben bedeutet. Manche Produkte zeigten gute technische Lösungen, die ästhetische und ergonomische Umsetzung jedoch erlaubte keine Auszeichnung. Die Herausforderung für die Entwickler ist ein "humanes" Produkt zu gestalten, das wie in kaum einem anderen Bereich ganz unmittelbar und sehr intim mit dem "kranken" Patienten in Interaktion steht.

und System für das Pflegepersonal eine Erleichterung deren täglichen Aufgaben bedeutet.
 Manche der Produkte zeigen gute technische Lösungen, die ästhetische und ergonomische Umsetzung jedoch erlaubte keine Auszeichnung. Die Herausforderung für die Entwickler ist ein "humanes" Produkt zu gestalten, das wie in kaum einem anderen Bereich ganz unmittelbar und sehr intim mit dem "kranken" Patienten in Interaktion steht.
 The challenge for the designers is to develop a "human" product that interacts very directly and intimately with the "ill" patient in a way that will be very often felt.





iF yearbook product 2009

Cleanius - **Patienten:** Fast so gemütlich wie die Toilette zu Hause.

Geschlechterunabhängig - für Urin und Stuhl gleichzeitig

Cleanius dient zur **gleichzeitigen**, Aufnahme von **Stuhl und Urin**. Für Frau und Mann gleichermaßen vorteilhaft, sauber und sehr angenehm.

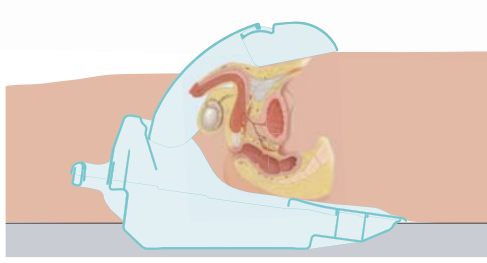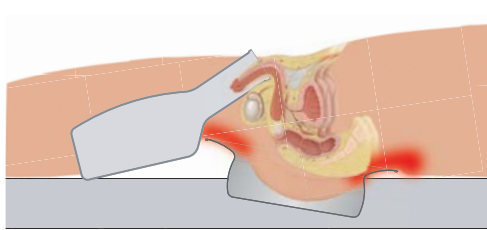

Mehr Intimsphäre und Würde - wesentlich geringere Geruchsbelästigung

Die medizinisch ergonomische Formgestaltung von Cleanius und der sich stufenlos an den Körper anschmiegende Spritzschutz reduzieren die Geruchsentwicklung deutlich und bieten als einziges System einen hervorragenden Sichtschutz.

Sichere Anwendung und stabile Lage

Viele Patienten verkrampfen sich auf den kalten und harten Blechtöpfen; der Patient kann sich nur ungenügend stabilisieren.



Die beiden seitlichen Griffe und die flache Form geben Stabilität und ein sicheres Gefühl.

Cleanius - **medizinische Vorteile:** Medizinisch wertvoll, für eine schnelle Heilung.

Hoher Liegekomfort durch große Auflageflächen

Der Edelstahltopf ist kalt, hart und unangenehm. Der schmale Auflagerand (rot) schmerzt nach kurzer Zeit und kann Druckgeschwüre, Dekubitus verursachen. Beim Entlangfließen von Urin am Rücken besteht zusätzlich die Gefahr von Wundinfektionen.



Cleanius bietet höchsten **Liegekomfort** durch die mehr als 3,5-fache Hauptauflagefläche (grün) und eine große Nebenauflagefläche (hellgrün). Optimale Gewichtsverteilung und geringe punktuelle Belastung sind die beste **Dekubitusprophylaxe**. Der warme, hautsympathische Kunststoff ist sehr angenehm. Die **Wirbelsäulen entlastende Vertiefung** in der Auflagefläche bietet Sicherheit und Schmerzfreiheit auch nach Operationen.

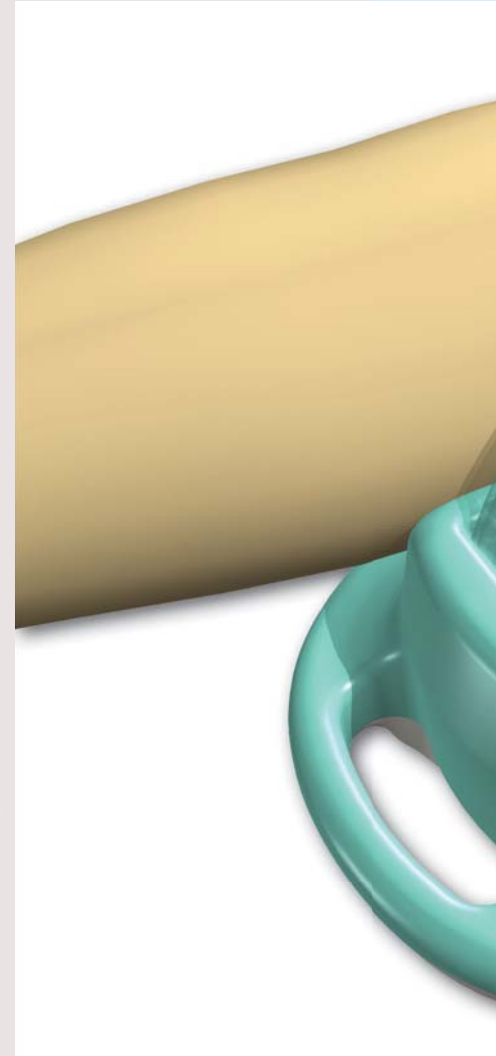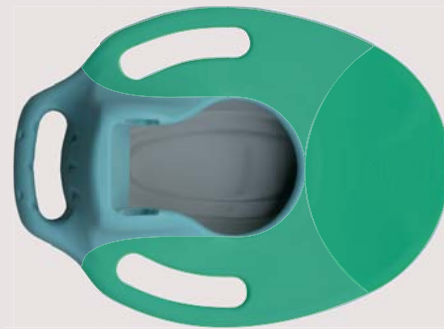

Wesentlich geringere Gesäßverschmutzung - keine Sekundärinfektionen

Bei konventionellen Steckbecken taucht das Gesäß sehr tief in den Topf ein - die Topföffnung ist unnötig groß. Der Patient wird mit den eigenen Ausscheidungen verschmutzt.

Bei Cleanius ist die Öffnung zur Aufnahme der Ausscheidungen nur so groß wie nötig; ein Eintauchen des Gesäßes ist unmöglich. Der Patient liegt nicht in seinen Ausscheidungen, **Sekundärinfektionen werden wirkungsvoll verhindert.**

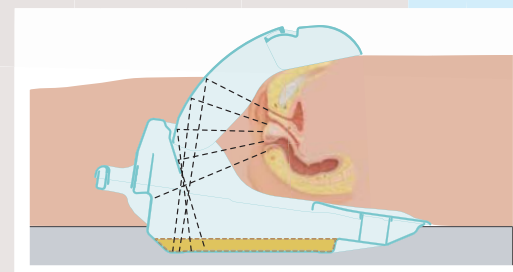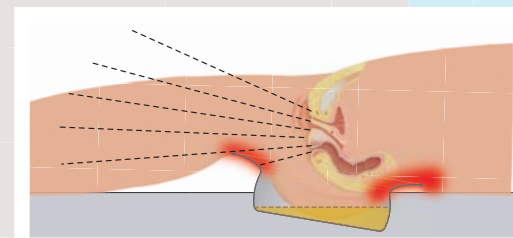

Cleanius - Pflegekräfte:
Die saubere Lösung einer unangenehmen Pflicht.

Cleanius

international patentiert.
 Medizinprodukt der Klasse I, zertifiziert nach Richtlinie 93/42/EWG Anhang VII.

Weniger Stress für Patienten und Pflegekräfte



Cleanius ist warm und bequem. Gerade bei längerer Verweildauer schätzen die Patienten den warmen und ergonomisch geformten Kunststoff.

Cleanius wird rechtzeitig angefordert, weil der Patient weiß, dass er "davor" und auch "danach" druck- und schmerzfrei und ganz entspannt auf Cleanius verweilen kann.


Einfach zu handhaben

Zur seitlichen Auflagerung kann der Patient von der Pflegekraft weg oder zur Pflegekraft hin gedreht werden. Cleanius lässt sich auch beinseitig leicht unterschieben.


Die richtige Lage des Patienten auf Cleanius wird erreicht, wenn das menschliche Kreuzbein mit dem auf Cleanius abgebildeten Kreuzbein deckungsgleich liegt.

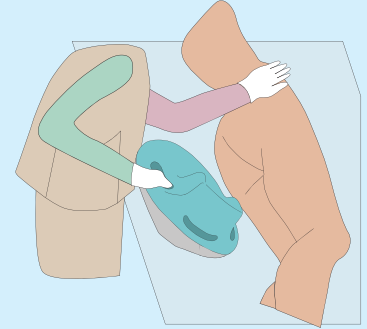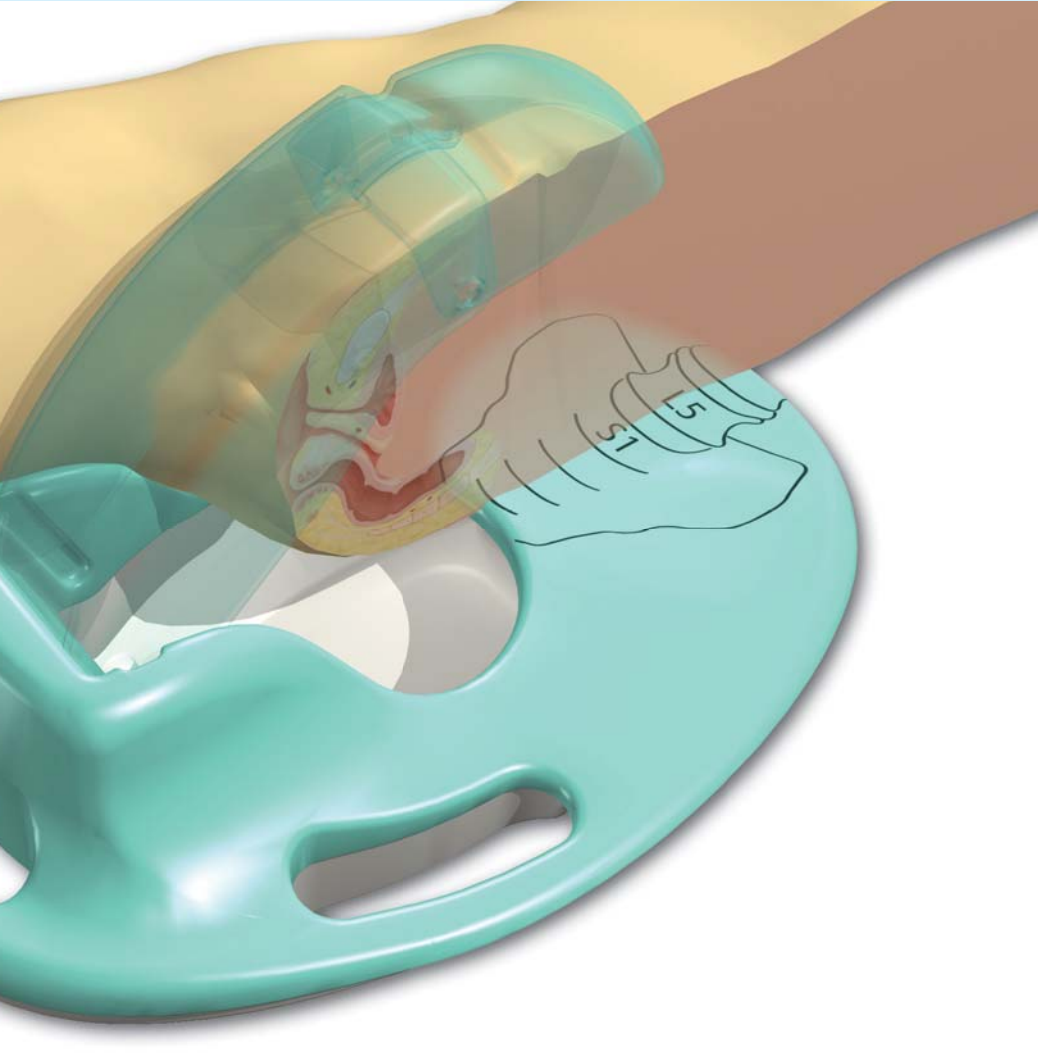

oder

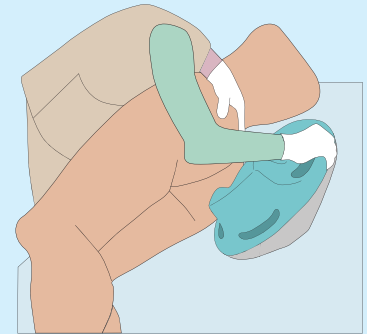


oder

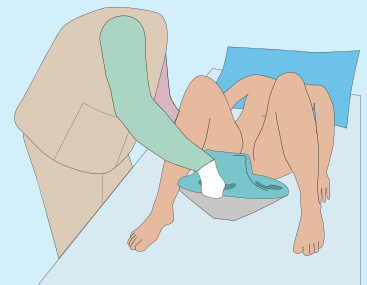

Keine Bettenverschmutzung - kontrollierte Ausscheidungsrichtung

Bei herkömmlichen Töpfen können Stuhl und Urin ungehindert nach vorne am Topf vorbei auf das Bettlaken spritzen, insbesondere bei Diarrhöe oder Einlauf.

Durch den Spritzschutz werden alle **Ausscheidungen sicher nach innen geleitet**. Das verhindert wirksam jegliche Bettenverschmutzung. Der Patient kann sorglos pressen.

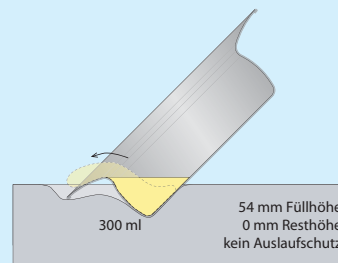

Entfernen ohne Bettenverschmutzung - kein Saugnapfeffekt

Insbesondere beim seitlichen Entfernen des Topfes schwappt der Inhalt häufig über und verschmutzt das Bett, kein Auslaufschutz.

Cleanius kann sich nicht festsaugen, bietet durch seine Hohlform und das Doppelkammersystem (Reservekammer) auch bei Seitenneigung während des Entfernens einen hervorragenden Auslaufschutz.

Cleanius - Hygiene:

Eine saubere Sache.

Immer dort, wo Steckbecken zur Anwendung kommen, ist die Gefahr groß, dass Ausscheidungen des Patienten unkontrolliert und ungehindert ins Bett gelangen.

Hierdurch werden mögliche Infektionswege geschaffen, die besonders bei infektiösen Ausscheidungen zu oft unterschätzten Infektionsketten werden können.

Kleinste Feststoffpartikel werden als Kontakt- oder

Schmierinfektion weitergereicht. Belastete Aerosol-Partikel, die sich in der Umgebungsluft frei bewegen, können Tröpfcheninfektionen verursachen.

Die Hygiene zieht deshalb immer darauf ab, diese Infektionswege und Infektionsketten zu unterbrechen. Patient und Bett sollten möglichst saubergehalten und jegliches Verspritzen von Ausscheidungen nach außen verhindert werden.

Offenes System - konventioneller Topf

Die hygienischen Nachteile sind allgemein bekannt.





Bei herkömmlichen Steckbecken, die nach dem Prinzip des offenen Systems funktionieren, werden bei jeder Anwendung Partikel und Tröpfchen von Stuhl und Urin ungehindert in den Bereich des Patientenbettes und in die Umgebungsluft abgegeben.

Mögliche Infektionswege werden hierdurch begünstigt. Sie können bei infektiösen Ausscheidungen zu einer gesundheitlichen Gefährdung der Pflegekräfte und sich im Zimmer befindlichen Personen führen.

Geschlossenes System - Cleanius

Die Vorteile des geschlossenen Cleanius-Systems sind sofort erkennbar.

Bestmögliche hygienische Voraussetzungen für Patient und Pflegekräfte. Verschmutzungen und Infektionswege durch Ausscheidungen werden deutlich reduziert. Die ungehinderte Abgabe von Partikeln und Tröpfchen in die Umgebungsluft wird durch den Spritzschutz deutlich reduziert. Dies ist besonders wichtig bei belasteten oder infektiösen Ausscheidungen. Möglich wurde dies erst durch die besondere Formgestaltung und das Doppelkammersystem des Cleanius sowie den einzigartigen Spritzschutz, der gleich mehrere Funktionen in sich vereint.

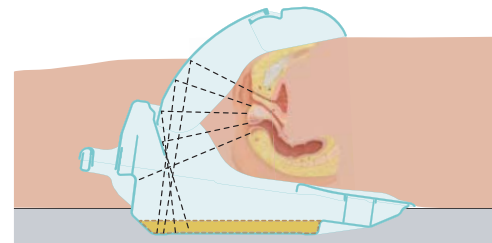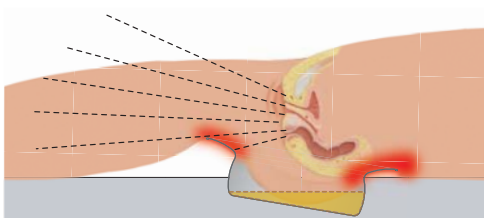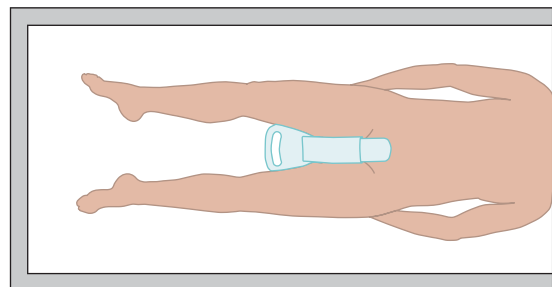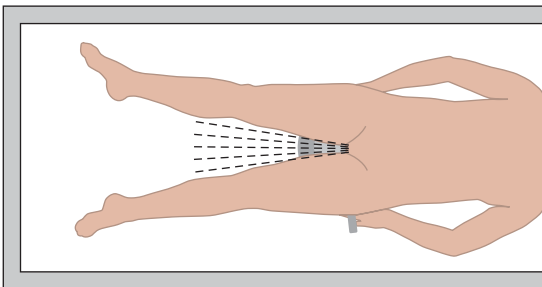

Durch die zu große Öffnung des Topfes kann sich der Patient an seinen eigenen Ausscheidungen verschmutzen.

Das Eintauchen des Gesäßes in die eigenen Ausscheidungen und das Verschmutzen des Patientenbettes wird wirkungsvoll verhindert.

Berichte von Patienten und Pflegekräften

Erfahrungsberichte vieler Patienten und Pflegekräfte aus den unterschiedlichen Bereichen wie Krankenhaus, Pflegeeinrichtung und Pflege zuhause bestätigen die große Verbesserung der hygienischen Gesamtsituation durch den Einsatz von Cleanius.

Cleanius Compact & multiclean3

Wirtschaftlichkeit:

Hohe Kostenersparnis in vielfacher Hinsicht.

Kostensenkung durch Wegfall der Bettenverschmutzung !

Obwohl deutlich teurer als ein normales Steckbecken, amortisiert sich Cleanius allein schon durch den Wegfall der Bettenverschmutzung nachweisbar innerhalb weniger Wochen!

Unter der Annahme, dass bei jeder 10. Anwendung eines herkömmlichen Steckbeckens das Bett verschmutzt wird und dadurch Kosten für Arbeitszeiten und Wäschelogsitik von mindestens 10,00 Euro entstehen, ergibt sich über die Lebensdauer des Cleanius ein stattlicher Einsparungsbetrag von mehreren Tausend Euro pro Cleanius.

Kostensenkung durch Vermeidung von Sekundärinfektionen (Fallpauschale)

Durch Cleanius können Dekubitus und Sekundärinfektionen wirkungsvoll verhindert werden. Damit auch unnötige zusätzliche Krankenhaustage, die aufgrund der Fallpauschale zu Lasten des Hauses gehen. Hier ergibt sich ebenso über die Lebensdauer von Cleanius ein weiteres Einsparpotential von mehreren Tausend Euro pro Cleanius.

Rasche Amortisation auch des multiclean3-Apparates

Durch die attraktive Kosteneinsparung des innovativen Steckbeckens Cleanius Compact amortisieren sich auch die Anschaffungskosten des multiclean3-Apparates innerhalb weniger Jahre.

Attraktivitätsgewinn für Ihr Haus


Die Aversionen und Ängste der Patienten gegenüber dem herkömmlichen Steckbecken sind begründet und hinreichend bekannt. Der Attraktivitätsgewinn für Ihr Haus durch Cleanius ist enorm wichtig in einer Zeit, in der sich alle Häuser um eine gute Belegung bemühen und die Entscheidung des Patienten zunehmend vom gebotenen Komfort beeinflusst wird. Cleanius bietet Ihnen die Möglichkeit, sich positiv abzuheben, gerade bei solch grundlegenden Dingen wie einer Bettpfanne. Die Auszeichnung mit dem bedeutendsten deutschen Designpreis unterstreicht dies in herausragender Weise.



Bessere Pflege setzt sich durch.

Cleanius Compact & multiclean3
Das bewährte System, in vielen Häusern und Einrichtungen im Gebrauch.

Referenzen:

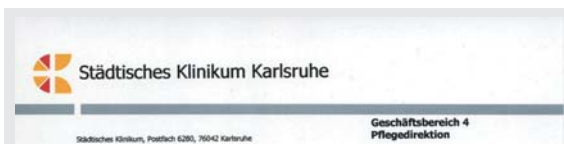

Erfahrungs- Referenzbericht Cleanius Pflegepaket

Beurteilung und Bewertung des Steckbeckens „Cleanius“ (dem zugehörigen Steckbeckenspülergerät „multiclean 3“ hinsichtlich der Eignung im praktischen Alltagsbetrieb im Hinblick auf die Patiententreue, die Akzeptanz, die Vorteile für die Akzeptanz sowie der Hygiene/ Reinigung und Desinfektion). Die Installation im Hause wurde als „Cleanius“ komplett (mit dem Komfortsteckbecken „Cleanius Compact“ mit Wäsche- und Desinfektionsapparat „multiclean3“ der Firma KODRA). Seit September 2010 sind in unserem Haus auf den Static und C 22 sechs Geräte des vorbenannten „Cleanius“ Pflege-Reinigungs- und Desinfektionsapparates, 7 Regalen und 1 „Cleanius Compact“ im Einsatz.

Die Inbetriebnahme der Reinigungs- und Desinfektionsapparates am 21.09.2010 durch Herrn Buchalla und Herrn Utz. Besonderes Augenmerk wurde hierbei auf die theoretische und praktische Handhabung des Komfortsteckbeckens „Cleanius Compact“ im Einsatz.

Beurteilung des Gesamtsystems nach 2,5 Jahren. Mehrmals wurde durch Fragebögen seitens der Firma KODRA der Einsatz auf den betreffenden Stationen abgefragt und die Ergebnisse mit sehr positiven Ergebnissen. Aufwändig wurde die Einweisung des Komfortsteckbeckens...



CHARITÉ

Campus Benjamin Franklin | Campus Buch | Campus Mitte | Campus Virchow-Klinikum

Charité | Campus Mitte | 10117 Berlin

Walter Fischer GmbH & Co.
Kodra Apparatebau KG
Bruno-Jacoby-Weg 9
70597 Stuttgart

Pflegedirektorin
H. Françoise-Kettner

Prüfung / Bewertung des Steckbeckens „Cleanius Compact“ / Steckbecken-Spül- und Desinfektionsapparat „Kodra mc3-GT“

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Februar 2011 erhielten wir den oben genannten Steckbecken-Spül- und Desinfektionsapparat zur kostenlosen Probestellung für 4 Wochen. Erhalten waren sechs Steckbecken „Cleanius Compact“ einschließliche vorgesehener Wäschekorb. Einsatzort war eine orthopädische Unfall- und Wiederherstellungschirurgie am Campus Mitte.

Die Aufstellung und Montage wurde durch die hauseigenen Handwerker durchgeführt. Sowohl die Erst-Inbetriebnahme, wie auch die Einweisung des Pflegepersonals...



St. Hedwig PFLEGEHEIMAT

St. Hedwig, Mühlentwiete 26, 08120 Heideberg

ServoClean
Tulpenweg 21

09607 Emskirchen

Referenz: Cleanius

Eine Einrichtung der Congregatio
der heiligen Schwestern vom
heiligen Vincent von Paul, Heppenheim

Titel: 06221417-0, Fax: 06221417-100


Datum: 07. Dezember 2007

Beschreiber: Olga Bazarov

Durchwahl: 417-130

Cleanius Eco

und Cleanius Compact
unterscheiden sich in
Material und Art der Reinigung!

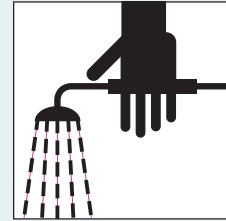

Cleanius Eco für manuelle Reinigung bis 65°C.

Der hygienische Standard für alle Pflegebereiche ohne
Steckbecken-Spülapparat.

Die Reinigung nach der Benutzung erfolgt immer manuell.

- **Anerkanntes Hilfsmittel**
Krankenkassen 19.40.04.0031
Pflegekassen 51.40.01.0031
- **international patentiert**

Benutzung **ohne** Folienbeutel:

Stuhl und Urin werden nach der Benutzung direkt in die Toilette entleert. Wichtig: Nach vorne über die Spitze entleeren! Hierbei wird unnötiges Spritzen verhindert. Die Restverschmutzung wird manuell abgespült. Die Oberflächen werden anschließend abgetrocknet und wenn erforderlich desinfiziert.

Mit Handbrause:



Reinigung und Desinfektion:
Es können handelsübliche kunststoffverträgliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden.

Benutzung **mit** Folienbeutel:

alternativ kann der Innenraum von Cleanius Eco mit einem Folienbeutel ausgekleidet werden. Bei Anwendung des Folienbeutels sollten Sie das angebotene Urin- und Stuhlbindemittel verwenden, dadurch werden alle flüssigen Ausscheidungen wie bei einer Einmalwindel gebunden.

Nach Gebrauch wird der benutzte Folienbeutel entnommen, verschlossen und im Hausmüll entsorgt.

Der Innenraum von Cleanius Eco bleibt dadurch weitgehend sauber. Abschließend werden gegebenenfalls beschmutzte Flächen mit einem feuchtem Tuch gereinigt und wenn erforderlich desinfiziert.

Mit Folienbeutel:




Zubehör :

- Pflegeset 40**
40 Folienbeutel, 40 Bindemittel
- Pflegeset 80**
80 Folienbeutel, 80 Bindemittel

Cleanius Compact

und Cleanius Eco
unterscheiden sich in
Material und Art der Reinigung!

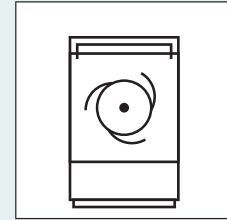

Cleanius Compact für maschinelle Reinigung bis 110°C.

**Das hygienische Gesamtkonzept für Krankenhäuser und
Pflegeheime.**

Cleanius Compact & passender Steckbecken-Spülapparat.

Maschinelle Aufbereitung im Steckbecken-Spülapparat.

Die maschinelle Aufbereitung des Cleanius Compact erfolgt professionell in einem passenden Steckbecken-Spülapparat, der auch alle anderen gängigen Sanitärgerätschaften reinigt und desinfiziert.

Freundliche Räume durch HPL statt Edelstahl -
Beispielkollektion:



- **Medizinprodukt der Klasse I**
zertifiziert nach Richtlinie
93/42/ EWG Anhang VII
- **international patentiert**

Mit Cleanius können wir Ihnen eine bereits bewährte Lösung anbieten, die alle bekannten Nachteile der bisherigen Steckbecken ergonomisch, human und ästhetisch löst.



Cleanius Compact

Das Steckbecken

Das hygienische Gesamtkonzept für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Cleanius Compact und Steckbecken-Spülapparat multiclean3.

Maschinelle Aufbereitung im mc3-Apparat

- Die maschinelle Aufbereitung von Cleanius erfolgt professionell im neuen Steckbecken-Spülapparat "multiclean3".
- Exzellentes Handling an der geöffneten Apparatetür, hervorragendes Spülergebnis und gesicherte thermische Desinfektion.

multiclean3 [=mc3]

Alle Spülsysteme

Alle Sanitärgerätschaften

Alle thermischen Desinfektionsverfahren

Wandregal "Cleanius"

- Mit Halterungen für 6, 4 oder 2 Cleanius Steckbecken, horizontal oder vertikal
- Mit Abtropfschale aus Edelstahl
- Abmessungen:
horiz: B 345; 690; 1035, H 500, T 380 mm
verti: B 345, H 500; 975; 1450, T 380 mm
- oder Abmessungen nach Maß



- Die Aufbereitung auch aller anderen, gängigen Sanitärgerätschaften erfolgt in einem Universalhalter. Kein Gestellwechsel erforderlich.
- Apparategehäuse wahlweise aus hochwertigem HPL oder Edelstahl.
- Turmapparat:
B 600, H 1800, T 580 mm.
- Untertischapparat:
B 1200, H 1000, T 580 mm.



& multiclean3

Der Steckbecken-Spülapparat

Medizinprodukt der Klasse IIa,
zertifiziert nach EN ISO 13485 und
Richtlinie 93/42/EWG Anhang II

- **spült**
- **reinigt**
- **desinfiziert**

mit einzigartigen Systemen
alle gängigen Sanitärgerichte
thermisch, A0-Wert-orientiert



Thermische Desinfektion

- Reinigung und Desinfektion durch Kochendwasser und Dampf
- Aggregat komplett aus Edelstahl
- Wasser- und energiesparende Mikroprozessor-Steuerung
- A0-Wert orientiert nach Norm EN ISO 15883

Bedienungsfreundliche Mikroprozessorsteuerung

- Einfachste Bedienung durch farbige Starttasten
- Display mit Klartext-Anzeige
- Flexible Einstellung für geringsten Verbrauch
- Komplette Dokumentation zur Hygieneüberwachung

Elektrischer Anschluss

- 230 V 50 Hz, 3,2 kW oder
400 V 50 Hz, 5,5 kW

Anschluss Wasser

- Kalt- und Warmwasser je R 3/4" (DN 20)
Abwasserabfluss 100 mm (DN 100)

- Neu! Serienmäßig mit Schwenkhalter für Messbecher



Sicheres und nachhaltiges Etablieren des Cleanius & mc3 Pflegepakets in Ihrem Hause durch unsere Handhabungsschulung

■ Die Durchführung der Handhabungsschulung und Inbetriebnahme des Pflegepakets beinhaltet die herstellerseitige Schulung Ihrer Pflegekräfte im Sinne der EG Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

■ Die Schulung und Inbetriebnahme beinhaltet ein professionelles Training im Umgang mit dem bereits vielfach bewährten Komfort-Steckbecken Cleanius Compact. Hierbei wird die richtige Handhabung in Bezug auf den Patienten sowie das anschließend korrekte Einlegen von Cleanius Compact in den Spülapparat multiclean mit dem Personal trainiert.

■ Die Schulung kann auch im Schulungspass der Pflegekräfte eingetragen werden.

Cleanius GmbH
Tel: +49 (0) 9181 / 295-970

mobil: +49 (0)152 / 318 77 7 77
E-mail: info@cleanius.de

KODRA & Cleanius, der besondere Service

Nach Vereinbarung bieten wir Ihnen an:

- Beratung durch unsere Medizinprodukteberater
- Probestellung unseres Systems Cleanius Compact und multiclean
- Werksführungen in Stuttgart

Ihre **KODRA**
Medizinprodukte-Berater:

Theodor Engel


Hamburg, Bremen,
Schleswig-Holstein,
Niedersachsen
Tel: 0176 / 83 73 05 05
engel@kodra.de

Gerd Dieterich

Nordrhein-Westfalen
Saarland, Hessen,
Rheinland-Pfalz
Tel: 0151 / 20 77 70 86
dieterich@kodra.de

Beratung und Vorführung

- Unsere Medizinprodukte-Berater stellen Ihnen gerne die innovative Kombination "Cleanius" und "multiclean" vor.
- Bitte sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
- Vereinbaren Sie einen Termin mit "Ihrem" Medizinprodukte-Berater von KODRA
- Fordern Sie unsere ausführlichen Planungsunterlagen und Ausschreibungstexte an

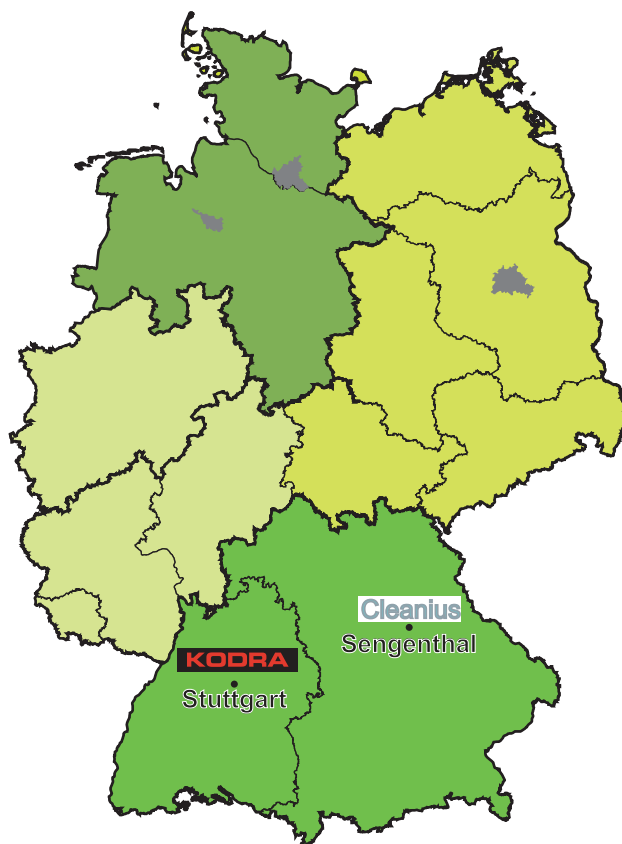

Jens Riedel

Mecklenburg-
Vorpommern,
Berlin,
Brandenburg,
Sachsen,
Sachsen-Anhalt,
Thüringen
Tel: 0172 / 7 63 12 66
riedel@kodra.de

Alexander Ilic

Baden-Württemberg,
Bayern
Tel: 0172 / 7 63 12 67
ilic@kodra.de

KODRA GMBH & CO. KG

Bruno-Jacoby-Weg 9
D 70597 Stuttgart (Degerloch)
Telefon: +49 (0) 7 11 / 7 20 02- 0
Telefax: +49 (0) 7 11 / 7 20 02- 22
E-mail: info@kodra.de
Internet: www.kodra.de

Änderungen durch technische Innovation
vorbehalten. Stand: Juli 2017

Cleanius GmbH
Am Ursprung 9
D 92369 Sengenthal
Tel: +49 (0) 9181 / 295-970
Fax: +49 (0) 9181 / 295-971
E-mail: info@cleanius.de
Internet: www.cleanius.de